

MODE D'EMPLOI – MASQUE INCLUSIF ENFANT

1 - Positionnez le masque sur la tête de l'enfant



2 - Pincez la barrette positionnée au niveau du nez afin que le masque soit bien ajusté sur la tête de l'enfant



3 - Placer les élastiques derrière les oreilles, si les élastiques sont trop grands : ajustez les en faisant des petits nœuds



Masques inclusifs aux normes NF.

Entretien : 15 fois à 60° pendant 30 minutes minimum de préférence, dans un filet à linge afin d'éviter les rayures sur la visière.